
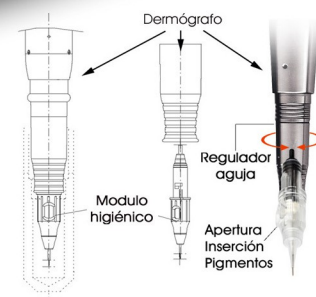


ET Modul White / ET Bimodul White

“ET White”, el modelo Premium de aparatos de Micropigmentación Euro Touch. Material y acabados de primera calidad, tecnología alemana y diseño vanguardista. Su base de control posibilita la regulación de la velocidad de trabajo y la profundidad de penetración.

El dermógrafo con la concepción, de sistema “Modulo Higiénico ET” garantiza una esterilidad absoluta. El sistema evita la entrada de pigmentos y aire contaminada en el dermógrafo.

El “modulo higiénico” es una unión de aguja y cono en una única pieza, lo que asegura máxima precisión e higiene. Un simple giro hace encajar el modulo en el dermógrafo, lo que posibilita cambiar instantáneamente el tipo de aguja o usar colores diferentes.

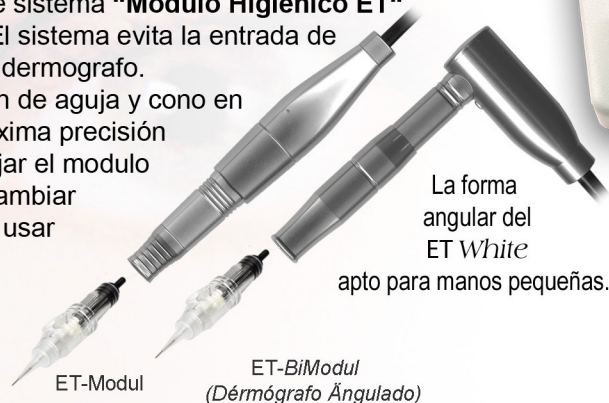


ET Onix (Dermógrafo Symphony)




El diseño de la base de control de la “ET Onix”, es ideal para el trabajo *freelance*, por su pequeño tamaño y peso. La carcasa, en aluminio se divide en 2 piezas base y electrónica hace este aparato idoneo para los desplazamientos.

Posibilidad de usar los dos tipos de dermógrafos (ET Modul Recto o Angulado) y el (ET Symphony) según el trabajo a realizar, manteniendo el uso del “Modulo Higiénico” para asegurar precisión e higiene.

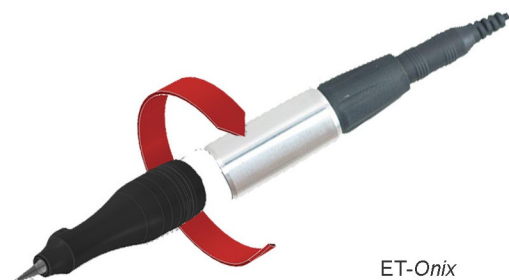

ET-Onix
(Dermógrafo Symphony)

ET Onix (Dermógrafo Modul / Bi Modul)

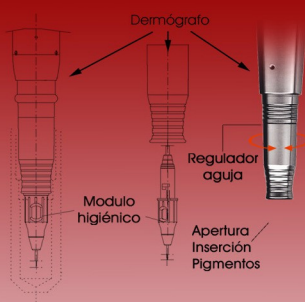

ET-modul Onix
ET-Bimodul Onix



EURO-TOUCH®
Permanent Make-Up
www.eurotouch.net

Modulos Higiénicos para las maquinas
ET Onix
ET Modul White



1 punta •

Trazados muy finos y precisos, rectificación de pequeños errores

3 puntas "micro" ♥

Trazados un poco mas gruesos que las de **1 punta** . perfectos para cejas "pelo a pelo"; puede sustituir el modul de **1 punta** en todos trabajos

3 puntas "out line" ♥

Contorno de labios fino, eyeliner fino, relleno de pestañas, cejas compactas

3 puntas ♥

Contorno de labios fino, eyeliner fino, relleno de pestañas, cejas compactas

3 sloped |||

Llamadas "bailarinas" por la posibilidad de trabajar con 1 o 3 puntas (según posición del demógrafo) Espectaculares resultados en cejas "pelo a pelo";

4 puntas planas

Espectaculares resultados en cejas "pelo a pelo"; poner las agujas del modulo en posición paralela al dibujo de pelo que quiere obtener, relleno de mucosa, difuminados.

5 puntas ✕

Grandes trazados, rellenos, contorno de labios

5 puntas magnum ✕

Eye-liner, Tattoos, rellenos

5 sloped |||||

llamado "bailarinas" por la posibilidad de trabajar con 1 ó 5 puntas (según posición del demógrafo) Difuminados perfectos

7 puntas ✕

Las siete agujas forman un círculo perfecto lo que permite trazados anchos en labios, apenas sin necesidad de saturar el trazada.

9 puntas ✕

Se recomienda para ejecutar Eye-liner en un tiempo record. También para rellenos de grandes zonas, senos, reconstrucción de areolas, calvas y demás trabajos medicales, Tattoos

Velociad de la maquina
percusiones: **100-110**

Velociad de la maquina
percusiones: **110-120**

Velociad de la maquina
percusiones: **120-130**

Velociad de la maquina
percusiones: **120-130**

Velociad de la maquina
percusiones: **120-130**

Velociad de la maquina
percusiones: **120-130**

Velociad de la maquina
percusiones: **130-140**

Velociad de la maquina
percusiones: **130-140**

Velociad de la maquina
percusiones: **130-140**

Velociad de la maquina
percusiones: **150**

Velociad de la maquina
percusiones: **150**



3, 5 y 7 puntas POWER

Deslizar muy lentamente el Modulo-Aguja sobre el trazo dibujado y hacer 3 pasadas.

Velociad de la maquina
percusiones: **120-130**